

Gebrauchsanweisung orthopädische Maßschuhe, MPG, MDR, Sonderanfertigung

Sehr geehrter/r:

Sie wurden durch uns mit orthopädischen Maßschuhen versorgt.

Beachten Sie bitte folgende Hinweise!

1. Führen Sie täglich eine gründliche Fußpflege und Fußinspektion durch. Achten Sie besonders auf mögliche Druckstellen und andere Verletzungen, welche durch den Schuh und/oder der Einlage entstehen könnten.
2. Vorsichtiges Einlaufen der neuen orthopädischen Maßschuhe:

Tag 1 am Vormittag: 15 Minuten, anschließend **Sichtkontrolle ohne Strümpfe**

Tag 1 am Nachmittag: 30 Minuten, anschließend **Sichtkontrolle ohne Strümpfe**

Tag 2 am Vormittag: 60 Minuten, anschließend **Sichtkontrolle ohne Strümpfe**

Tag 2 am Nachmittag: 90 Minuten, anschließend **Sichtkontrolle ohne Strümpfe**

Tag 3 am Vormittag: 180 Minuten, anschließend Sichtkontrolle ohne Strümpfe

Tag 3 ab Nachmittag: unbegrenzte Tragezeit bei **ständiger Sichtkontrolle beider Füße**.

Achten Sie besonders auf die Fußsohlen und Fersen. Hierzu können Sie einen Spiegel als Hilfe nehmen.

Bei Auffälligkeiten melden Sie sich bitte unverzüglich bei uns unter der Rufnummer: 03681/ 799628 und vereinbaren mit unserem Orthopädie- Schuhmacher- Meister eine Termin für die Korrektur.

3. Schließen Sie alle Verschlüsse und Schnürungen gleichmäßig, dass sich der Druck über die ganze Verschlussfläche gleichmäßig verteilt. Setzen Sie die Ferse auf und drücken den Fuß so weit wie möglich nach hinten, um einen losen Sitz zu vermeiden. (Scheuergefahr)
4. Vermeiden Sie Futter- und Strumpffalten.
5. Tragen Sie nur die verordneten orthopädischen Maßschuhe.
Diese können Ihren Fuß nur entlasten, wenn sie auch getragen werden, d.h. auch im Haus und nicht nur bei Besorgungen und Spaziergängen.
6. **Bei Durchfeuchtung der orthopädischen Maßschuhe trocknen Sie diese langsam. Bitte nicht auf die Heizung oder Ofen legen.**
7. **Benutzen Sie keine scharfen und ätzenden Mittel zum Reinigen.** Sie können mit herkömmlichen Schuhputzmitteln Ihre orthopädischen Maßschuhe pflegen.
8. Lassen Sie durch den Arzt bei jedem Praxis- oder Hausbesuch eine **Fußinspektion** durchführen.
9. Stellen Sie sich regelmäßig bei uns vor. Bei Fußproblemen nehmen Sie bitte sofort Kontakt mit Ihrem Hausarzt oder mit unserem Orthopädie- Schuhmacher- Meister auf. Bringen Sie immer alle Ihre orthopädischen Maßschuhe mit, ggf. auch ein Ersatzpaar konfektionierter Schuhe, falls Sie bis her nur mit einem Paar Maßschuhe versorgt wurden.

Konformitätserklärung gemäß Artikel 19 i.V.m. Anhang IV der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und Rates über Medizinprodukte

Name des verordnenden Arztes/med. Einrichtung: «Arzt»

Interne Verwaltungsnummer:

Patientenname: «Anrede» «Name» Vorname: «Vorname»

Geburtsdatum: «GebDatum» Vers.-Nummer: «VersicherungsNr»

Konformitätserklärung gemäß Artikel 19 i.V.m. Anhang IV der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und Rates über Medizinprodukte

Wir versichern, dass das vorstehend beschriebene Produkt in seiner Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der VO (EU) 2017/745 entspricht. D.h. dass die verwendeten Komponenten, evtl. auch Komponenten unterschiedlicher Hersteller, kompatibel zueinander sind. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Modifikation des Produktes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.